


# 數位計數器 DBC-9D 使用手冊

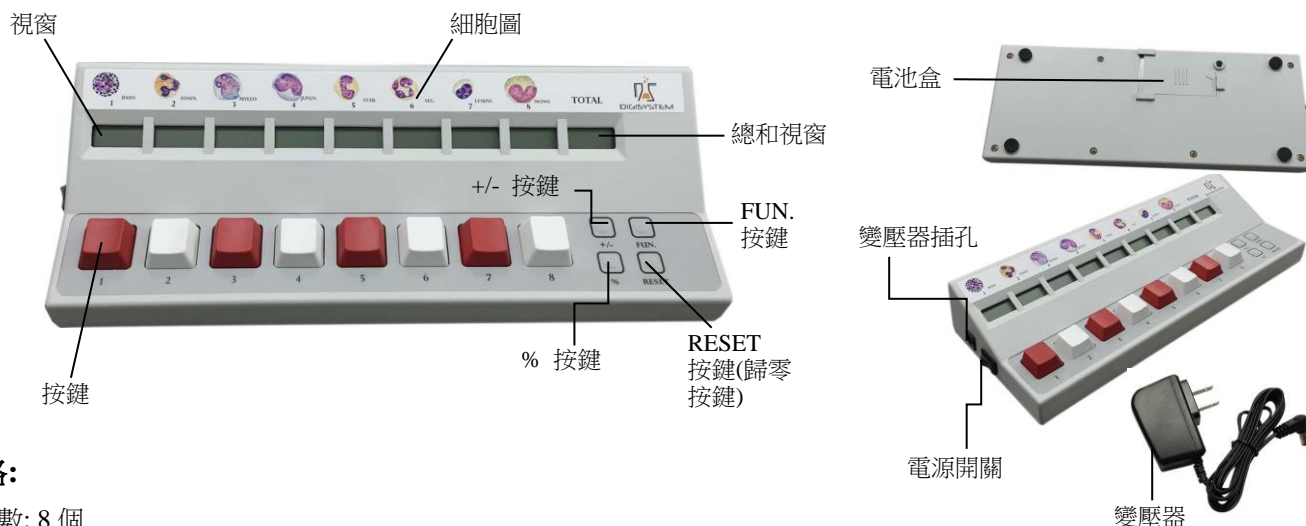

## 規格:

按鍵數: 8 個

視窗數: 9 個 3 位數 LCD 視窗(包含 1 個總和視窗)

功能鍵數: 4 個功能鍵(+/-, %, FUN., RESET)


標準配件: 1 個 3.3V 1.2A 變壓器

電源供應: 100~240V 50/60Hz 或 2 個 AA 電池 (備註: 此產品不包含電池, 電池請自行購買)

## 使用方法:

1. 將變壓器一端插至變壓器插孔, 一端插至電源插座。如果使用電池, 請將 2 個 AA 電池, 裝於電池盒中。之後, 將電源開關打開。
2. 按 1~8 個按鍵即可計數。一次只按一個按鍵。每個按鍵皆有一個對應視窗顯示計數值。
3. 總和視窗值為 100 倍數時(如 100、200、...、900), 機器會發出“嗶”聲響。
4. 任何一視窗值到達 999 時, 機器會發出“嗶嗶”聲響, 機器無法再繼續計數。
5. 連續 4 分鐘無使用, 機器會發出“嗶”聲響, 進入自動休眠模式。按任意鍵, 機器會發出“嗶”聲響, 可解除休眠模式, 回到休眠前畫面, 可開始計數。
6. 功能按鍵: 按下功能按鍵時, 機器會發出“嗶”聲響。

6.1 **+/- 按鍵:** 此功能按鍵可設定計數器為增加(+)模式或減少(-)模式。在減少模式下, 每個視窗數字前會出現“-”的符號如下:

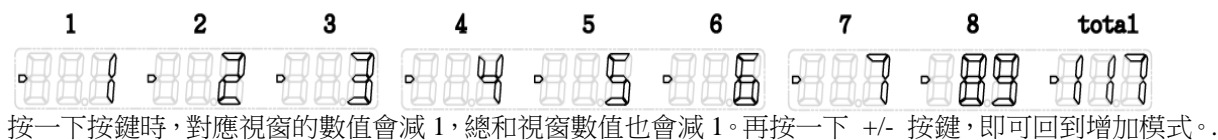

6.2 **% 按鍵:** 按下此功能按鍵可計算每個視窗的百分比值, 再按一下按鍵, 可回復到原來畫面。

6.3 **RESET 按鍵:** 此功能按鍵為歸零按鍵, 可清除畫面數值。

6.4 **FUN. 按鍵:** 此功能按鍵可調整畫面對比值與顯示電池剩餘量。畫面如下:



如果使用變壓器, 電池剩餘量顯示 100。當電池剩餘量為 10 時, 數字會閃爍, 提醒更換新電池。再按一下 FUN.按鍵, 可回復到原來畫面。

## 注意事項:

1. 請使用 3.3V 變壓器，否則機器會被損會。
2. 如使用電池，建議使用碳鋅電池。
3. 長時間沒有使用機器，請將電池取出。

## 維修手冊

**注意:** 機體發生異常，請詳讀與用說明書，按下表檢查，檢查時請關閉電源，以防危險。若無法自行排除故障，請聯絡經銷商服務維修。維修時需特別技術，請勿自行拆解機體處理。

問題	可能原因	故障排除
無法啟動電源	變壓器沒連接好	重新連接變壓器
	電源插座故障	更換一個新的電源插座
	變壓器故障	更換一個新的變壓器
	電池沒電	更換新電池
	使用錯誤變壓器，損壞線路板	請使用 3.3V 變壓器，並更換線路板
	線路板故障	更換一個新的線路板
	電源開關沒開	將電源開關打開
功能按鍵沒作用	線路板故障	更換一個新的線路板
計數不正確	線路板故障	更換一個新的線路板
	按鍵按法不正確	一次只能按一個按鍵

## 線路圖

